



恒生防护 | 恒生康养 | 知年适老



恒生防护 | 恒生康养 | 知年适老

# 产品说明书

## INSTRUCTION MANUAL

山东恒生控股集团

Shandong Heng Sheng Holding Group



营销中心: 山东·济南 滨河商务中心D座14室

生产中心: 山东省德州市齐河开发区名嘉路中段

山东恒生控股集团

Shandong Heng Sheng Holding Group

## 前言

### FOREWORD

感谢您购买恒生的产品。

在使用产品之前,请仔细阅读使用说明书并正确使用及了解。  
阅读后请妥善保管此说明书,以便随时查阅、参考。

## 终身有限保修

### OFFER REPAIR SUPPORT

您所购买的恒生的产品如果存在材料和制造工艺方面的缺陷,我们将为购买的顾客提供终身有限保修。此项服务是建立在严格的标准工艺和产品发货前仔细地检查的基础上,终身有限保修说明我们对我们的产品和产品工艺以及我们对顾客的多年的可靠服务有信心。

发生了保修范围内的缺陷,我们有权选择维修或替换装置,本质量保证不包括由于顾客的误用和疏忽或者正常磨损,本质量保证不包括不耐用组件,如橡胶配件,属于正常的磨损任何要定期更换。

如果您对我们的装置或质量保证有任何疑问,请与我们联系。

## 注意事项


### PRECAUTIONS

- 使用前请仔细检查各个部位,如发生低端易损件异常,请及时更换。
- 本产品应放置在干燥、通风、平稳、无腐蚀性物质的室内。
- 每周定期检查产品是否完好。
- 这款产品能帮助行动困难的老人、孕妇等行动不便人士自理,如厕洗澡的时候不用人帮忙了。
- 本款扶手内芯采用高强度优质不锈钢制作,表面胶管采用优质ABS原料,美观耐用;防爆ABS外壳,优选全新ABS原颗粒,经高压注塑一次成型,倒角更圆润,具有防爆抗老化、耐磨的高抗外壳;扶手采用内螺纹连接,连接方式更稳固更加耐用。夜光效果,无毒荧光材料,更长寿命,人性化设计,保障出现突发状况时的及时辅助。

适用人群:老年人、病人、孕妇等行动不方便的人群。

## 产品结构

### PRODUCT STRUCTURE

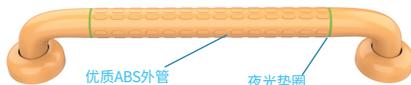


产品线:卫浴产品线 产品系列:HS-024A 扶手材质:优质ABS 颜色:白色/黄色

内芯材质:不锈钢 扶手直径:3.5cm 垫圈:夜光垫圈 防滑效果:凸点防滑颗粒


底座:加厚垫片底座 墙面紧固件材质:不锈钢

## 安装方法


### INSTALLATION METHOD

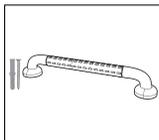


1. 打开包装,检查产品及配件是否完整(扶手1套/螺丝胀塞8套)。

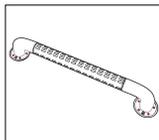

2. 将底座与墙面贴合,用记号笔标记孔位。

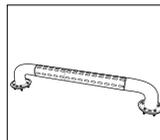

3. 用手枪钻在标记点处打孔并插入膨胀塞;将扶手底座孔位与膨胀塞孔位对齐,插入自攻丝并拧紧。

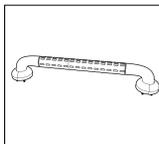

4. 扣合法兰盖并检查确定完全紧固,安装完成。



微信公众号